



Výplach očí v případě cizích předmětů

Sterilní 0,9 % roztok chloridu sodného, který zmírňuje nepříjemné pocity a zabraňuje následným komplikacím způsobeným cizími tělesy v očích.

FAKTA A VÝHODY VÝROBKU

- Účinně odstraňuje prach, nečistoty a další znečištění v očích
- Snadná manipulace – snadno se aplikuje zraněnou osobou nebo s asistencí
- Flexibilní řešení – lahve pro mobilní použití a stanice pro montáž na stěnu
- Ergonomický oční nástavec, zajišťující šetrný a příjemný proud
- Široké využití – od průmyslových pracovišť po laboratoře a lékárničky první pomoci
- Vysoká funkční spolehlivost – láhve splňují požadavky normy EN 15154-4
- Skladovatelnost 3,5 roku u uzavřených lahví



Výrobek je označen CE
v souladu se směrnicí
o klasifikaci zdravotnických
prostředků (MDD 93/42/EHS)



Kombinujte výplach očí Eyewash 0,9% Sodium Chloride s výplachem očí Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate pro pracoviště s rizikem chemických nehod.

Poznejte své chemikálie a zajistěte nejvhodnější první pomoc

Příčina nehody určuje, který oční výplach je nutný. Když dojde k nehodě, je nezbytné určit, zda ji způsobil cizí předmět nebo kyseliny či zásady – a pokud možno, jakou hodnotu pH má daná látka.

Pokud je pH buď silně kyselé, nebo zásadité, začněte vyplachovat vodou Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate, dokud není láhev prázdná. Lahvičku vyhodte a oplachujte ji přípravkem Eyewash 0,9% Sodium Chloride, dokud se nedostanete k lékaři nebo na pohotovost.

Když je pH neutrální, oplachujte přípravkem Eyewash 0,9% Sodium Chloride, dokud není lahvička prázdná, a po použití lahvičku zlikvidujte.

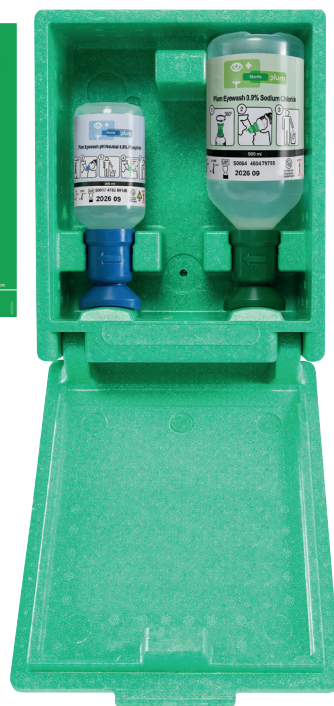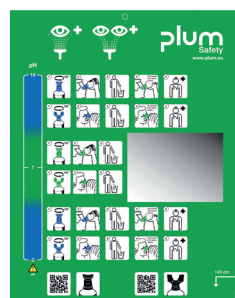

PS4789 – Combi-box (obsahuje 1× 200 ml Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate, 1× 500 ml Eyewash 0,9% Sodium Chloride a 1× kartu s návodem a zrcátkem)

ERGONOMICKÝ OČNÍ NÁSTAVEC

Lahvičky jsou vybaveny ergonomickým očním nástavcem, který zajišťuje správnou a rovnoměrnou aplikaci tekutiny. Jemným stlačením lahvičky vytvoříte šetrný a příjemný proud.



Pružný, ergonomický oční nástavec, který udržuje oční víčko otevřené během používání

Obj. číslo	PS4691	PS4604
Velikost	200 ml	500 ml
Balení	1× 200 ml	1× 500 ml

